

## Hygiène des masques de mannequins Laerdal

Instructions d'utilisation



CE  
0086



**Laerdal**

helping save lives

www.laerdal.com

### Hygiène des masques de mannequins Laerdal


Nous recommandons la fourniture d'un masque de visage par étudiant. Ceci évite d'avoir à utiliser un procédé de décontamination entre les étudiants. Tous les étudiants peuvent également utiliser un masque installé en permanence sur le visage du mannequin et désinfecter le masque après chaque utilisation par un étudiant.

### Utilisation du même masque de visage par tous les étudiants

Si plusieurs étudiants utilisent le même masque de visage, il est nécessaire de le désinfecter après chaque utilisation par un étudiant.

### Virkon®M

Le Rapid Pack Laerdal (Virkon®M) est le moyen le plus pratique de désinfecter le masque. Remplir la bouteille d'eau tiède et ajouter un comprimé Virkon®M à l'eau. Attendre 2 minutes. Visser le capuchon de la bouteille. Secouer doucement la bouteille pour s'assurer de la dissolution intégrale du comprimé Virkon.

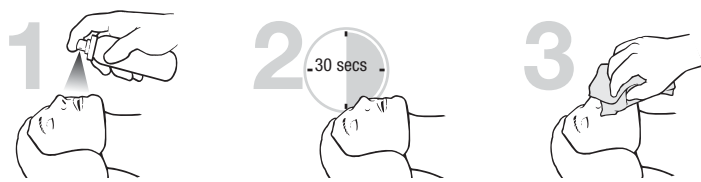

Pulvériser le masque de visage (bouche et nez) jusqu'à ce qu'il soit bien mouillé (6-8 pulvérisations). Ne pas laisser le produit Virkon®M couler de la surface du masque. Attendre 30 secondes et bien essuyer avec un chiffon jetable. S'assurer qu'il soit bien sec. La pratique de la respiration artificielle peut maintenant continuer.

Note: Suivant la réglementation locale, il peut être préférable d'utiliser les pochettes désinfectantes de mannequin Resusci (voir ci-dessous) pour nettoyer le masque ou une solution fraîche d'hypochlorite de sodium mais il faut alors suivre des procédures différentes.

### Utilisation des pochettes désinfectantes de mannequins

Déchirer l'emballage de la pochette. Prendre une pochette sans la déplier. Essuyer la bouche et le nez du masque de visage vigoureusement. Bien recouvrir la bouche et nez avec la pochette et attendre 30 secondes. Essuyer le masque de visage avec un mouchoir en papier propre ou similaire.

La pratique de la respiration artificielle peut maintenant continuer.



### Écrans de visages de mannequins (en option)

La désinfection correcte du masque du mannequin offre des bonnes conditions d'hygiène en cours de formation. Cependant, pour des raisons esthétiques certains étudiants préfèrent qu'il y ait une barrière propre entre leurs lèvres et les surfaces touchées par les lèvres d'une autre personne. Les écrans de visages de mannequins sont conçus comme un moyen de protection peu coûteux et pour s'entraîner à l'utilisation des écrans de visages Laerdal utilisés en situation d'urgence réelle.


Voir les instructions d'utilisation sur l'emballage

### Désinfection après le cours:

#### Préparation du visage du mannequin pour l'utilisation suivante (Virkon®M)

Note : Porter des gants pendant la préparation de la solution désinfectante et pendant les opérations de nettoyage. (Des gants en vinyle sont recommandés car les gants en latex peuvent laisser des marques sur le masque de visage)

1. Retirer le masque et l'attache sur la face interne du masque.
2. Nettoyer les masques et les attaches comme suit:

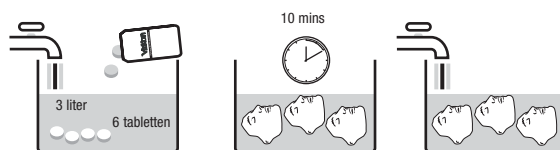

- a) Utiliser une solution Virkon®M à 1% (2 comprimés par litre).
  - b) Immerger tous les composants dans la solution.
  - c) Frotter pour éliminer les taches résistantes le cas échéant et laisser tremper pendant 10 minutes.
  - d) Rincer à l'eau propre.
3. Laisser sécher les composants.
  4. Réassembler les attaches et les masques de visage.

### Numéros de commandes de réapprovisionnement:

15 42 30 Virkon®M Rapid Pack (10 comprimés de 5 g et bouteille)  
15 42 31 Virkon®M comprimés (10 de 5 g)



**IRRITEREND**

### Comprimés uniquement:

- Irritant pour la peau
- Danger grave pour les yeux
- Nocif pour les organismes aquatiques
- Ne pas laisser les comprimés à la portée des enfants
- Éviter tout contact avec la peau ou les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau et consulter un médecin.

Fabriqués par: Antec International - Une société DuPont

Windham Road, Chilton Industrial Estate,  
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, England.

Tel: +44 (0) 1787 368000 Fax: +44 (0) 1787 375391

E-mail: Human-Health@gbr.dupont.com Web: www.relyon.dupont.com